

Instructiekaart HbA1c meting m.b.v. de DCA Vantage

Zet het apparaat aan met de knop aan de achterkant van de DCA Vantage.

Het apparaat is gebruiksklaar als "READY" op het display staat.

De cartridge en capillair moeten voor gebruik op kamertemperatuur zijn.

Verwijder de folieverpakking van de cartridge.



Haal een houder met capillair uit de verpakking.

Verricht de bloedafname uit de vinger.



Vorm een goede druppel en vul de capillair zonder luchtbelletjes.

Plaats de houder in de cartridge totdat de houder vastklikt (ronde kant naar rechts).



Verwijder de flexibele strook uit de cartridge en sluit de klep. De analyse start direct.

Scan de barcode van de reagenscartridge.



Het apparaat vraagt nu om patiëntgegevens, voer deze in (handmatig of scannen).

Open de klep en plaats de cartridge.




Na het invoeren van de gegevens verschijnt de resterende analysetijd in beeld.

Plak de printstrook op het analyseformulier voor Result Laboratorium en voorziet dit van de juiste patiëntgegevens.

Stuur het formulier naar Result Laboratorium.

Open de klep en verwijder de gebruikte cartridge.

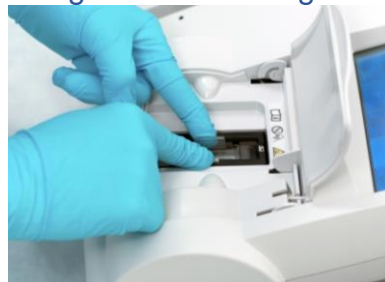

Druk op de witte ontgrendelknop, duw de cartridge naar rechts en verwijder deze uit het compartiment.

Zet de DCA Vantage uit aan het eind van de dag.