


Instructiekaart PT test met de CoaguChek XS Pro **Result** Laboratorium

Zet het apparaat aan



Scan je gebruikersbarcode

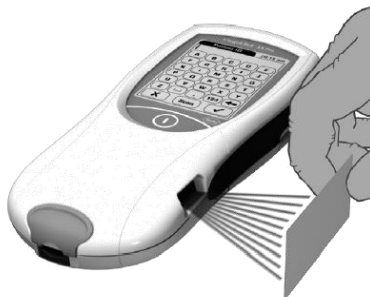


Kies Patiëntentest




Scan het patiënten ID en bevestig met




Plaats teststrip

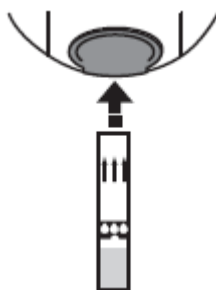

De teststrip wordt opgewarmd

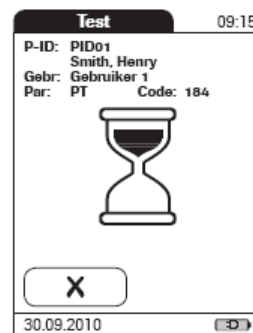



Wacht op druppel symbol

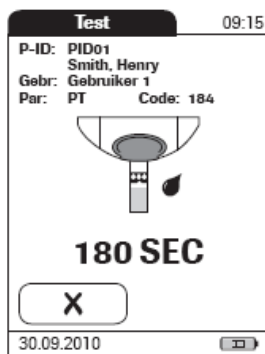

Breng binnen 180 seconden een bloed druppel op de strip op de bovenkant of aan de zijkant



Na de meting verschijnt de INR uitslag op het display.

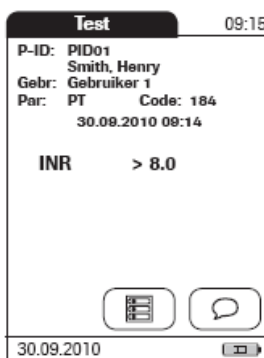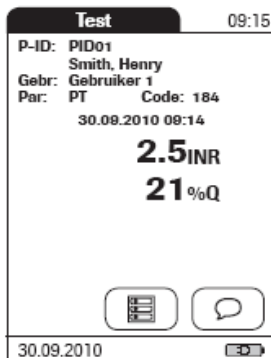

Aandachtspunten bij bloedafname:

- Bij een slechte doorbloeding de vinger eerst opwarmen.
- Maak de prikplaats schoon met water of alcohol 70%.
- Prik aan de zijkant van de vingertop van de ring- of middelvinger.
- Houd de vinger tegen de teststrip en laat de (1^e) bloeddruppel opzuigen door de teststrip.

Controlemeting (door POCT team)


Bereid de controleoplossing volgens bijsluiter




Kies controletest




Schuif de teststrip in de meter

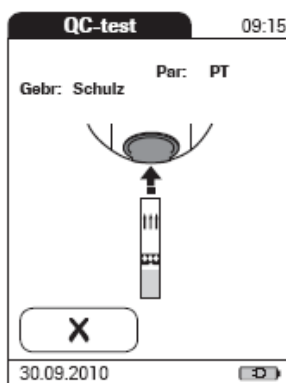


De teststrip wordt opgewarmd

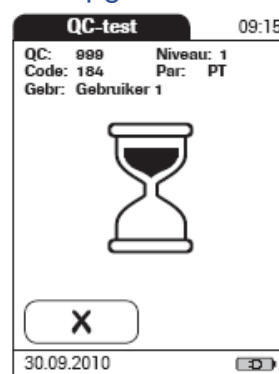

Wacht op druppel
symbool

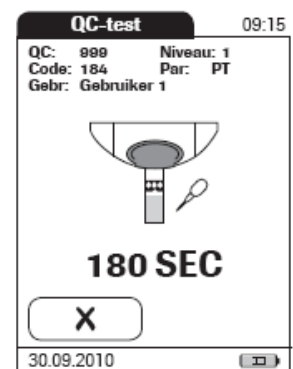

Breng binnen 180 seconden een bloed
druppel op de strip m.b.v. de pipet

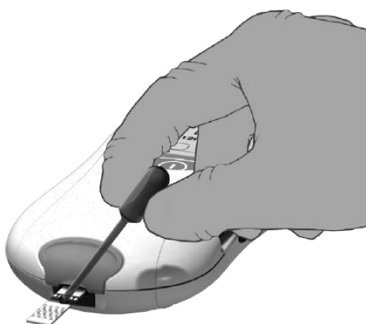

Na de meting verschijnt de INR uitslag op het display.

