

## Instructiekaart Hb bepaling met de HemoCue Hb 201

Zet het apparaat aan.



Draai de cuvethouder naar buiten.



Na 15 seconden is de meter klaar voor gebruik; je ziet drie knipperende streepjes.




Vul de cuvet in één keer; vul niet bij.



Controleer of het meetgedeelte van de cuvet geheel gevuld is en er geen luchtbelletjes in zitten.

Verwijder eventuele bloedresten aan de buitenzijde met een tissue.

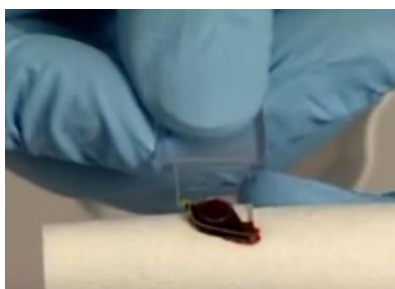

Plaats de cuvet binnen 10 minuten in de houder.



Tijdens de meting verschijnt een zandloper en drie stilliggende streepjes in het display.



Na 15 – 60 seconden verschijnt de Hb waarde in het display.



## Aandachtspunten bij bloedafname

- Bij een slechte doorbloeding de vinger eerst opwarmen.
- Maak de prikplaats schoon met water of alcohol 70%.
- Prik aan de zijkant van de vingertop van de ring- of middelvinger.
- Houd de vinger tegen de teststrip en laat de (2<sup>e</sup>) bloeddruppel opzuigen door de teststrip.

## Controlemeting

- Tijdens iedere analyseserie dient een controle te worden gemeten (max. 1 per dag).
- Flesje controlevloeistof 15 minuten op kamertemperatuur laten komen.
- Flesje controlevloeistof goed mengen door te kantelen.
- Breng een druppel op een stukje parafilm en vul de cuvet hiermee.
- Meetprincipe is hetzelfde als een patiënten meting.

## Resultaatverwerking

- Noteer het resultaat van de patiënten- en controlemeting op het formulier “Hb bepaling op de HemoCue”.
- Stuur het ingevulde formulier naar Result Laboratorium.