


Instructiekaart Hb bepaling met de HemoCue Hb 201 DM


Zet het apparaat aan en draai de cuvetthouder naar buiten



Na circa 15 seconden is de meter klaar voor gebruik en op het display verschijnen 4 iconen. Druk op (1) om een patiënten meting te starten.

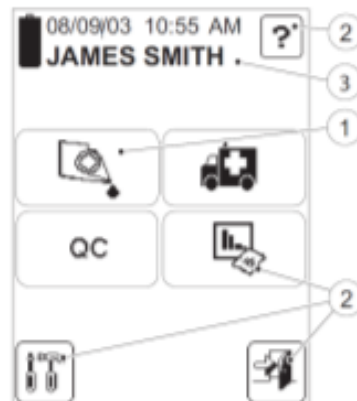

Vul de cuvet in één keer; vul niet bij.

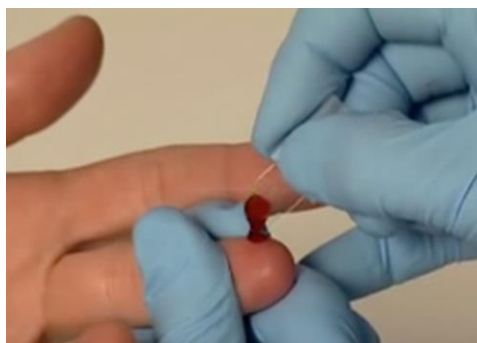

Controleer of het meetgedeelte van de cuvet geheel gevuld is en er geen luchtbelletjes in zitten. Verwijder eventuele bloedresten aan de buitenzijde met een tissue.



Plaats de cuvet binnen 10 minuten in de houder

Gedurende de meting verschijnt de tekst "Wachten a.u.b. Meten"



Na 15 – 60 seconden verschijnt de Hb waarde op het display.

Verwijder de cuvet en maak eventueel het laadstation schoon.

Schakel de meter uit door de aan / uit knop circa 2 seconden in te drukken.

Aandachtspunten bij bloedafname

- Bij een slechte doorbloeding de vinger eerst opwarmen.
- Maak de prikplaats schoon met water of alcohol 70%.
- Prik aan de zijkant van de vingertop van de ring- of middelvinger.
- Houd de vinger tegen de teststrip en laat de (2^e) bloeddruppel opzuigen door de teststrip.

Controlemeting

- Tijdens iedere analyseserie dient een controle te worden gemeten (max. 1 per dag)
- Flesje controlevloeistof 15 minuten op kamertemperatuur laten komen
- Flesje controlevloeistof goed mengen door te kantelen
- Breng een druppel uit het flesje op een stukje parafilm en hier vul de cuvet hiermee.
- Meetprincipe is hetzelfde als een patiënten meting

Resultaatverwerking

- De resultaten worden, als de koppeling tussen de meter en de Cobas IT 1000 van Result Laboratorium gerealiseerd is, automatisch doorgestuurd naar het LIS, zodat ze in het elektronische patiëntendossier zichtbaar zijn.
- Totdat de koppeling gerealiseerd is, moeten de resultaten van een Hb meting en controle meting worden genoteerd op formulier "Hb bepaling op de HemoCue".
- Stuur dit formulier naar Result Laboratorium.