

Instructiekaart CRP test met de QuikRead go

Vorbereidingen

Neem een cuvet uit de koelkast en laat deze op kamertemperatuur komen (ca. 15 minuten).



QuikRead go inschakelen. Er wordt eerst een zelftest uitgevoerd (ca. 45 seconden).



Neem een reagenskapje uit de koker uit de koelkast en laat deze op kamertemperatuur komen. (ca. 5 minuten)



Prikker, handschoenen en pleister klaarleggen

Cuvet op rekje plaatsen, folie kort voor gebruik er af halen.




Plaats de plunjer in het capillair aan de lange zijde met de blauwe markering




Capillaire Afname

Raak met het uiteinde de bloeddruppel aan.

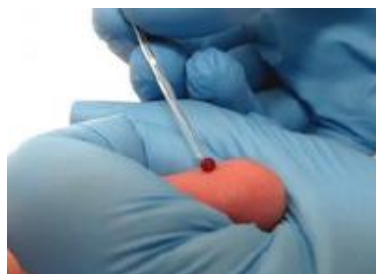

Het capillair zonder luchtballen vullen, tot aan het witte bolletje.

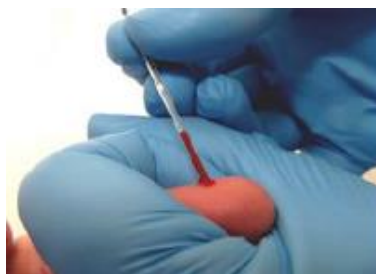


Bloedmonster overbrengen in het cuvet

Plaats het afnamecapillair met de plunjer in het cuvet.



Druk met de plunjer het capillair geheel leeg.

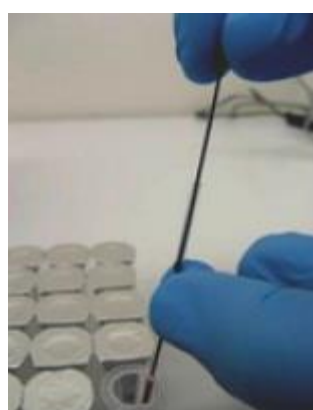

Verwijder capillair en plunjer. Sluit het cuvet af met het reagenskapje. Voorkom het indrukken van de blauwe kap.



Meting

Kies [Meten].



Kies [Abc]. Toets persoonlijke inloggegevens in; kies [OK].



Kies [Abc]. Toets het BSN of patiënten ID in; kies [OK].
Plaats de cuvet in het meetkanaal met de barcode naar voren.



Aandachtspunten bij bloedafname:

- Bij een slechte doorbloeding de vinger eerst opwarmen.
- Maak de prikplaats schoon met water of alcohol 70%.
- Prik aan de zijkant van de vingertop van de ring- of middelvinger.
- Raak met het uiteinde van het capillair de bloeddruppel aan, eventueel het capillair iets schuin houden
- Voorkom het “afsluiten” van het afnamecapillair: niet tegen de vinger duwen.
- Voorkom luchtballen in het capillair, dit zal een foutieve uitslag geven door een onjuist bloedvolume.