

INPAK INSTRUCTIE TRANSPORTBAK

Inpakken

BUIZEN SORTEREN IN 2 REKKEN

Lila & paarse 'buizen' in één rek, overige buizen in ander rek.

REKKEN IN ZAK, ZAK SLUITEN

Rekken op de tissue in de plastic zak plaatsen, zak afsluiten met knijper.

FORMULIEREN & ETIKETTEN SORTEREN

Gekleurde aanvragen en witte aanvragen sorteren. NIET VOUWEN! Etiketten stapelen.

REGISTRATIEFORMULIER INVULLEN

FORMULIEREN IN DE MAP

Map op de dichte zak leggen.

BAK VOL? NEEM EEN NIEUWE BAK!

CITO ONDERZOEK? BUIZEN APART, CITO KAART OP DE BAK!



Bewaar- & vervoersconditie 8 - 25 graden

ZET DE LOGGER AAN


Druk 1 sec. op de start toets. De logger staat aan als elke 2 sec. een groen lampje knippert.

ZOMERTIJD? COLDPACKS!

Voeg tijdens ieder transport na de aanvang van de zomertijd 2 coldpacks toe. Deze moeten minimaal 8 uur gekoeld zijn in koelkast. Zorg ervoor dat deze niet in contact komen met de buizen of logger.

BODE TE LAAT? BEL RESULT LABORATORIUM!

EXTREME HITTE? EXTRA COLDPACK!

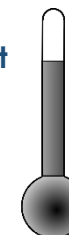

Problemen? Bel meteen Result Laboratorium!



(078) 6541019