

1 TITEL

Urinescreening met de Urisys 1100 teststrook meter.

2 DOEL/TOEPASSINGSGBIED

De Urisys 1100 is een reflectiespectrofotometer, ontwikkeld voor het aflezen van urinestroken.

De Urisys 1100 wordt gebruikt voor kwalitatieve en semi - kwantitatieve bepalingen in urine met behulp van Combur 7 teststroken. Met de speciale teststroken worden de volgende testen bepaald: glucose (GLU), eiwit (PRO), zuurgraad (PH), bloed of erythrocyten (BLD), ketonen (KET), nitriet (NIT) en leukocyten (LEU).

3 ALGEMENE GEGEVENS VAN HET APPARAAT

Urisys 1100 teststook meter

4 DEFINITIES

N.v.t.


5 BESCHRIJVING APPARAAT

De software van het Urisys 1100-analyseapparaat bevat een besturingssysteem, waarmee door de gebruiker alle laboratoriumspecifieke instellingen en veel gebruikte functies via de display en de functietoetsen kunnen worden gekozen.

De drie functietoetsen hebben betrekking op de specifieke functies, die op de tweede regel van de display worden weergegeven. Op de eerste regel van de display worden de status van het systeem en andere informatie voor de gebruiker weergegeven.

In alle submenu's wordt de gekozen status van het apparaat of de gekozen functiemodus vastgelegd door op de START knop te drukken. Het systeem keert dan terug naar de Ready - to Measure mode.

Voorkant

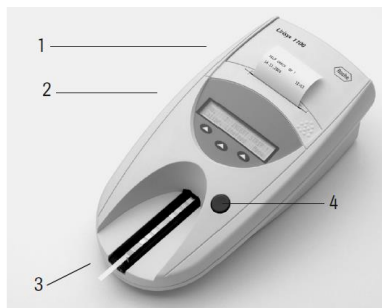

Achterkant



- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Printerdeksel | Kan opengeklapt worden om het printerpapier in te voeren |
| 2. Display/toetsen | LCD display en drie functietoetsen voor menugestuurde uitvoering en bediening. |
| 3. Teststrokengeleider | Houdt de teststrook op de juiste plaats. |
| 4. START knop | a Start het meten van de teststrook
b Sluit de submenu's en zorgt voor terugkeer naar het startmenu |
| 5. Aan/uit schakelaar | Voor het aan / uitzetten van het apparaat |
| 6. Serielle interface | Voor het aansluiten van een PC of hostcomputer |
| 7. Aansluiting netspanning | Bus voor het verbinden van het apparaat met de netspanningadapter |
| 8. 5-polige DIN-bus | Voor het aansluiten van een barcodereader of een toetsenbord. |

5.1 SPECIFICATIES

Monstersoort : Urine
Parameters : GLU, PRO, PH, BLD, KET, NIT, LEU
Meetmethoden : teststrook : reflectie spectrofotometrie - dubbele (enkele) golflengte
Soort test strips : Combur 7 urinestroken
Golflengtes: 565 nm (groen) 3x en 610 nm (oranje) 3x
Reactietijd : ca. 55 - 65 seconden
Meetcapaciteit : maximaal 50 monsters per uur
Geheugencapaciteit: 100 resultaten met datum, tijd en patiëntenidentificatie. Het geheugen wordt automatisch gewist bij het veranderen van de datum.

5.2 MEETPRINCIPE

De Urisys 1100 is een reflectie spectrofotometer, ontwikkeld voor het aflezen van Combur 7 teststroken. Na 55 - 65 seconden wordt in de optische unit de teststrook afgelezen. De verandering van kleur op het reagensvlak van de teststrook, is een maat voor de hoeveelheid van de specifieke componenten in de urine. In de optische unit worden de reactievelden met twee golflengtes gemeten, een meetgolflengte en een referentiegolflengte. Het gereflecteerde licht wordt opgevangen door drie detectoren. De combinatie van golflengtes kan per component verschillen.

Afkorting	Reactie
GLU = Glucose	Glucose oxidase reactie (GOD)
PRO = Eiwit	Eiwit verandert in een zuur milieu een pH indicator tot een cyaan gekleurd complex
pH = Zuurgraad	Testvlak met methylrood, fenolftaleïne en broomthymol blauw; de peroxidaseactiviteit van de haemgroep in hemoglobine of myoglobine zet H ₂ O ₂ om, gevolgd door een kleurreactie.
BLD = Bloed	Erythrocyten en/of hemoglobine/myoglobine katalyseren een oxidatiereactie in het testvlak waarbij organische hydroxyperoxide wordt omgezet
KET = Ketonen	Ketonen reageren met natrium-nitro-prusside in alkalisch milieu tot een paarse kleur
NIT = Nitriet	Nitriet reageert volgens de Griess reactie tot een roze gekleurd complex
LEU = Leukocyten	Activiteit meting van esterase in leukocyten; leidt tot een paarse gekleurd complex

5.3 GEBRUIK VAN MONSTERS EN TESTSTROKEN

5.3.1 MONSTERS

- Meng de urine goed voor een meting. NIET centrifugeren.
- Gebruik verse urinemonsters, niet ouder dan 2 uur en bij voorkeur ochtendurine.
- Voeg geen conserveringsmiddel, desinfectans of schoonmaakmiddel toe aan het urinemonster.
- Gebruik alleen voor urineonderzoek bestemde potjes
- Houdt het monster uit direct zonlicht.

5.3.2 TESTSTROKEN

- Gebruik geen teststroken van een andere fabrikant.
- Gebruik geen verlopen teststroken, of teststroken met zichtbare beschadiging aan de reagensvlakken.
- Raak de reagensvlakken niet met de vingers aan.

6 VEILIGHEID

6.1 BESCHERMING GEBRUIKER

Gebruikte urinebuizen bevatten mogelijk besmette lichaamsvloeistoffen. Neem de nodige voorzichtigheid in acht en vermijd contact.

6.2 BESCHERMING APPARATUUR EN OMGEVING

Geen extra maatregelen noodzakelijk.

7 HULPMIDDELEN EN REAGENTIA

PRODUCTNAAM	BEWAARCONDITIE	HOUDBAARHEID	INCONTO NUMMER
Combur 7 reagens strips	Kamertemperatuur	Zie exp.datum	30002951
Printerpapier thermisch 57 mm	Kamertemperatuur	n.v.t	30000314

8 ONDERHOUD

8.1 DAGELIJKS ONDERHOUD

<p>Zet het apparaat uit.</p> <p>Verwijder de teststroken geleider en spoel deze af onder stromend water.</p> <p>Desinfecteer de teststroken geleider met 70% alcohol en laat aan de lucht drogen.</p> <p>Plaats de teststroken geleider terug.</p> <p>Zet het apparaat aan.</p>	<p>Met de knop aan de achterzijde.</p> <p>Verwijder alle aanwezige urineresten.</p> <p>Indien nodig.</p>
---	--

8.2 WEKELIJKS ONDERHOUD

Het wekelijks onderhoud bestaat uit het uit en weer aanzetten van het apparaat

9 WERKWIJZE

9.1 KALIBRATIE

De Urisys 1100 voert automatisch een self-check uit wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Als de Urisys 1100 continu wordt gebruikt, dient het apparaat 1 keer per week te worden uitgezet / aangezet.

9.2 WERKVOORSCHRIFT

<p>Zet het apparaat aan.</p> <p>Doop een teststrook in het urinemonster.</p> <p>Verwijder de teststrook direct uit het urinemonster</p> <p>Plaats de teststrook (met de testvelden omhoog) zo ver mogelijk in de teststrokengeleider</p> <p>Druk op de blauwe startknop.</p> <p>Verwijder de teststrook en gooi hem weg.</p>	<p>Met de knop aan de achterzijde. Het apparaat voert nu een self-check uit. Als de functietest is uitgevoerd, geeft de printer een geluidssignaal en wordt "SELF CHECK OK" met datum en tijd afgedrukt, in het display verschijnt "Insert Strip" Als het apparaat in stand-by staat is het indrukken van de blauwe knop voldoende.</p> <p>Zorg ervoor dat alle testvelden in aanraking komen met urine. Teststrook niet buigen</p> <p>Verwijder de overtollige urinedruppels door de teststrook langs de rand van het urinepotje te halen en dep de onderkant en zijkant van de teststrook op een tissue.</p> <p>Het vergrendelingsstaafje moet hierbij omhoog staan.</p> <p>Er klinkt een korte pieptoon ter bevestiging. De teststrokengeleider schuift het apparaat in, het vergrendelingsstaafje gaat omlaag en het grijze referentieveld op de teststrokengeleider wordt gemeten Vijfenvijftig seconden nadat op de START knop is gedrukt wordt het eerste testveld gemeten. De teststrokengeleider keert na de meting terug in zijn uitgangspositie en het vergrendelingsstaafje gaat omhoog.</p> <p>Verwijder eventueel aanwezige urineresten van de teststrokengeleider met een niet-pluizende doek..</p>
--	--

<p>Het resultaat wordt geprint.</p> <p>Als het apparaat 5 minuten niet wordt gebruikt zal het in de stand-by stand komen. Druk op de blauwe knop voor een volgende meting.</p>	<p>Plak de printstrook op het daarvoor bestemde formulier en voorzie dit formulier van de juiste patiëntgegevens. Stuur de resultatenformulieren minstens 1 x per 2 weken naar Result Laboratorium. Zie 10.2.</p>
--	---

9.3 STORINGSAFHANDELING

Neem bij storingen contact op met een medewerker van het POCT team van Result Laboratorium, telefoonnummer 078-6523150, of stuur een e-mail naar poct@resultlaboratorium.nl

10 RESULTAATVERWERKING

10.1 BEREKENING EN/OF BEOORDELING

N.v.t

10.2 REGISTRATIE EN VERWERKING

Plak de printstrook op het daarvoor bestemde formulier voorzien van de patiëntgegevens.

Als de koppeling tussen de meter en de Cobas IT 1000 (software programma voor POCT apparatuur van het laboratorium) gereed is zullen de uitslagen automatisch doorgezonden worden naar het LIS / ZIS van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Tot die tijd moeten de uitslagen worden verzonden naar Result Laboratorium, waar ze handmatig in het LIS worden ingevoerd door een medewerker van het laboratorium.

11 JUISTHEID EN PRECISIE

11.1 URISYS 1100 VERSUS AUTION MAX VERGELIJKING

Vergelijking met 18 patiëntenmonsters.

In een representatieve serie metingen werd een goede vergelijking gevonden met enkele verwaarloosbare verschillen bij de meting van de pH en eiwit. De Aution Max is wel gevoeliger bevonden voor detectie van leukocyten. Zie validatierapport

11.2 DUPLICEERBAARHEID

Voor de dupliceerbaarheid is een patiëntenmonster 18 x achter elkaar gemeten (op 2 dagen). De gemiddelde imprecisie is 4,3%. In een serie metingen werd een variatiecoëfficiënt van 1,3% verkregen. Zie validatierapport.

11.3 REPRODUCEERBAARHEID

Reproduceerbaarheid (onnauwkeurigheid van dag tot dag):

De gemiddelde onnauwkeurigheid is 3,7%. In een serie metingen werd een variatiecoëfficiënt van 1,9% verkregen. Zie validatierapport.

12 KWALITEITSCONTROLE

12.1 KWALITEITSCONTROLE PLAN

12.1.1 APPARAAT RELATIES

Moeder apparaat	Urisys 1100 SN UX 09653854 Ultimo nr. 9235
Spiegel apparaat	AUTION MAX AX-4030 Ultimo nr. 72676

12.1.2 CONTROLES POCT

CONTROLE	MATERIAAL	FREQUENTIE
A: Intern	KOVA Liqua-Trol control level 1 en 2	1 keer per twee maanden
B: Inter	InterQC met 3 urine monsters	1 keer per twee maanden*
C: Extern	SKML POCT in urine	4 x per jaar 2 monsters

* frequentie verhoogd t.o.v. SOP wegens logistieke redenen.


12.2 KWALITEITSASSESSMENT

Acceptatiegrenzen worden ingericht volgens onderstaande methode: Gezien er semi-kwantitatief gemeten wordt, is een beoordeling middels een berekening niet mogelijk. De rapportage gebeurt van negatief, spoor, +, ++ tot ++++. Bij de pH is de rapportage in hele getallen. Er wordt een afwijking van 1 stap toegestaan op basis van variatie van de interne kwaliteitscontroles en de Urisys validatie.

CONTROLE GRENZEN

MATERIAAL	GRENZEN
A: Intern	Maximale afwijking van 1 plus meer of minder. Bij afwijkingen meting herhalen.
B: Inter	Bij een afwijkingen van meer dan 1 stap, worden opnieuw twee monsters vergeleken. Bij blijvende afwijkingen wordt er overlegd met de K.C.
C: Extern	De SKML uitslagen worden beoordeeld door de POCT coordinator en KC en besproken in het POCT overleg. Afhankelijk van de resultaten wordt besloten of er actie moet worden ondernomen.

OVERIGE VARIABELEN	HANDELING
Nieuwe lotnummers	Inlopen nieuw lotnummer volgens SOP.
Onderhoud	Geen.
Vervangen onderdelen	Uitvoering door firma indien nodig.
Buitengewone omstandigheden	Vergelijking van twee monsters met het moederapparaat.
Buitengewoon resultaat patiënt	Meting herhalen en vergelijken met moederapparaat.

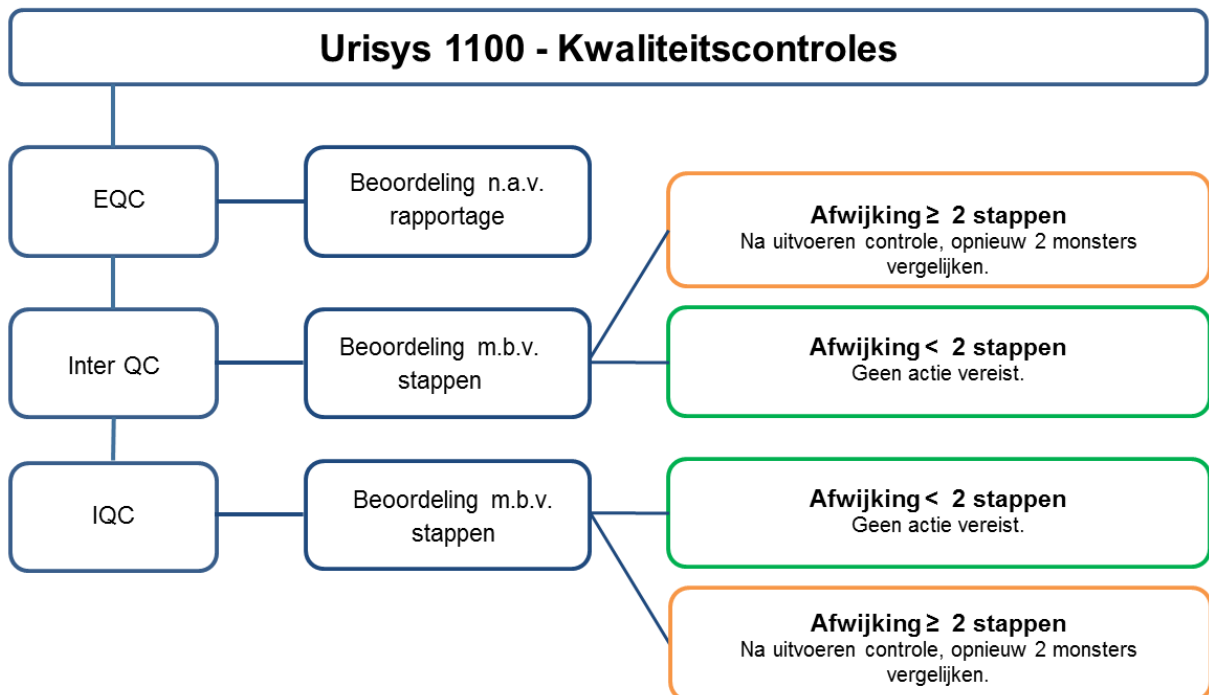

13 OPMERKINGEN

N.v.t.

14 LITERATUUR

1. Roche Urisys 1100 gebruikershandleiding.
2. Validatierapport Urisys 1100

15 BIJLAGEN

N.v.t.