


## Instructiekaart centrifuge Hettich EBA 270

Plaats de buizen met lichtgroene dop binnen 4 uur na afname in de centrifuge.



Zorg ervoor dat de centrifuge in balans is door de buizen tegenover elkaar in de houders van de centrifuge te plaatsen.

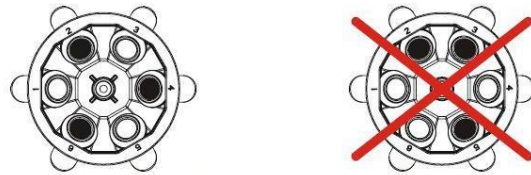

Stel de **RPM** in op **30** RPM met de behulp van de pijltjestoetsen.

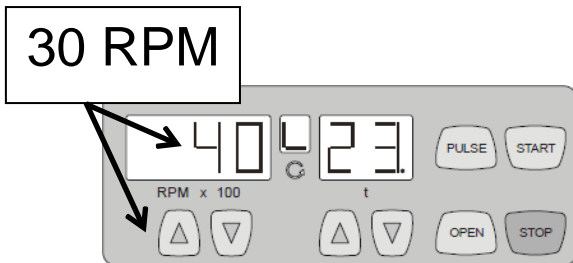


Fig. 2

Stel de tijd (**t**) in op **10** minuten met behulp van de pijltjestoetsen.

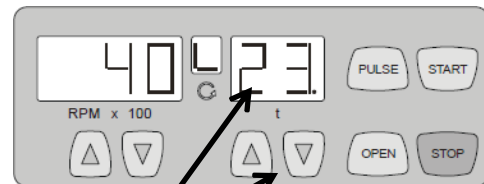


Fig. 2

10 minuten

Duw het deksel dicht totdat er een klink hoorbaar is en druk op **START**.

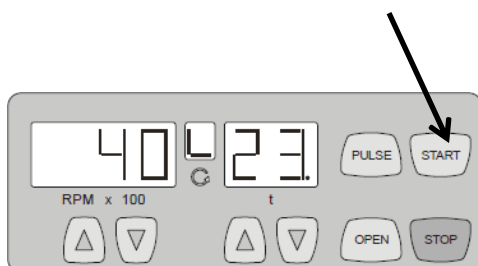


Fig. 2

Nadat de centrifuge klaar is open de deksel door op **OPEN** te drukken.

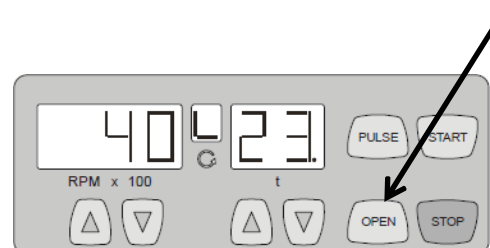


Fig. 2

## Onderhoud centrifuge

- Reinig wekelijks de binnenkant van de centrifuge met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek. Dit dient enerzijds voor de hygiëne en het verhindert corrosie door aanhechtende onzuiverheden. De centrifuge moet onmiddellijk na de reiniging worden gedroogd.
- Bij vorming van condenswater de centrifugeruimte meteen drogen door deze uit te vegen met een absorberende doek.
- Komt er bloed in de centrifugeruimte terecht, dan moet deze onmiddellijk worden gereinigd en gedesinfecteerd.
- De rubberdichting van de centrifugeruimte na elke reiniging licht inwrijven met talkpoeder of een rubberonderhoudsmiddel.