

Inpakinstructie transportbak

Inpakken



BUIZEN SORTEREN IN 3REKKEN

1: Lila & paarse, 2: Geel/groen (afgedraaid) 3: overige buizen (grijs, urine, blauw, rood)
Niet afgedraaide gele/groene buizen in een apart rek

REKKEN IN ZAK, ZAK SLUITEN

Rekken op de tissue in de plastic zak plaatsen, zak afsluiten met knijper.

FORMULIEREN & ETIKETTEN SORTEREN

Gekleurde aanvragen en witte aanvragen sorteren. **NIET VOUWEN!** Etiketten stapelen.

REGISTRATIEFORMULIER INVULLEN

FORMULIEREN IN DE MAP

Map op de dichte zak leggen.

BAK VOL? NEEM EEN NIEUWE BAK!


Bewaar- & vervoersconditie 8 - 25 graden

ZET DE LOGGER AAN

Druk 1 sec. op de start toets. De logger staat aan als elke 2 sec. een groen lampje knippert.

ZOMERTIJD? COLDPACKS!

Voeg tijdens ieder transport na de aanvang van de zomertijd 2 coldpacks toe. Deze moeten minimaal 8 uur gekoeld zijn in koelkast. Zorg ervoor dat deze niet in contact komen met de buizen of logger.

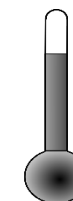

BODE TE LAAT? BEL RESULT LABORATORIUM!

EXTREME HITTE? EXTRA COLDPACK!

Problemen?·Bel·meteen·ResultLaboratorium!



(078)-6541019